

Hygienetipp 02|2024

Was besagt der A_0 -Wert bei der Aufbereitung von Medizinprodukten?

Der A_0 -Wert wird verwendet, um die benötigte Menge an feuchter Hitze für chirurgische Instrumente und für Steckbecken bei der thermischen Desinfektion in Reinigungs-Desinfektions-Geräten (RDG) festzulegen. Zur Abtötung von Bakterien inkl. Mykobakterien, Pilzen, thermolabilen Viren sowie Noroviren ist ein A_0 -Wert von 600 ausreichend. Ein A_0 -Wert von 600 bedeutet entweder eine Haltezeit von 10 min bei einer Temperatur von 80 °C oder eine Haltezeit von 1 min bei einer Temperatur von 90 °C.



Produkt des Monats

A 20 Instrumentendesinfektion - Vielseitig & schnell wirksam Konzentrat

6 x 1-l-Flasche

~~108,40 EUR~~
jetzt nur 92,14 EUR
zzgl. 19 % MwSt.

SIE SPAREN 15% !

Jetzt bestellen



Pläne - Flyer - Begehungen hygienesystem.de

Desinfektionspläne, Reinigungspläne und bebilderte Flyer einfach online erstellen.

Checklisten für Hygienebegehungen individuell bearbeiten.

Hygieneschulungen + Tests hygienewissen.de

Hygieneschulungen online



Die praktische orochemie Hygiene App



E-Mail-Hygienetipp:

Ihre E-Mail-Adresse befindet sich in unserer Datenbank. Somit erhalten Sie regelmäßig unseren Hygienetipp zu aktuellen Themen der Desinfektion und Hygiene unverbindlich und kostenlos. Es freut uns, wenn Sie den Inhalt interessant finden.

Sollten Sie jedoch in Zukunft keine weiteren Hygienetipps bekommen wollen, dann geben Sie uns hier bitte kurz Rückmeldung (klick). Ihre Adresse wird damit aus unserer Datenbank gelöscht.

orochemie im Internet : www.orochemie.de | www.orochemie.de/shop | www.hygienewissen.de | www.hygienesystem.de

Sollte der Hygienetipp nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.