

# Haltbarkeit und Standzeit

| Produkt                       | Max. Haltbarkeit <sup>1</sup> | Haltbarkeit nach Anbruch <sup>2</sup> | Standzeit der Gebrauchslösungen von Konzentraten |   | Standzeit mit oro® Vliestüchern |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
|                               |                               |                                       | ungebraucht                                      | gebraucht   |                                 |
| A 20 Instrumentendesinfektion | 4 Jahre                       | 4 Jahre                               | 28 Tage  | Max. 14 Tage je nach Verschmutzung                            | -                               |
| B 5 Wischdesinfektion         | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | 28 Tage  | Nach Verwendung bzw. nach max. 24 Std. entsorgen <sup>3</sup> | 28 Tage                         |
| B 10 Wischdesinfektion        | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | 1 Tag  | Nach Verwendung bzw. nach max. 24 Std. entsorgen <sup>3</sup> | 28 Tage                         |
| B 15 Wischdesinfektion        | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | 28 Tage  | Nach Verwendung bzw. nach max. 24 Std. entsorgen <sup>3</sup> | 28 Tage                         |
| B 20 Wischdesinfektion        | 4 Jahre                       | 4 Jahre                               | 28 Tage  | Nach Verwendung bzw. nach max. 24 Std. entsorgen <sup>3</sup> | 28 Tage                         |
| B 30 Schnelldesinfektion      | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | -  | -   | 3 Monate                        |
| B 33 Schnelldesinfektion      | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | -  | -   | 3 Monate                        |
| B 40 Schnelldesinfektion      | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | -  | -   | 3 Monate                        |
| B 45 Schnelldesinfektion      | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | -  | -   | 3 Monate                        |
| D 10 Absauggerätedesinfektion | 3 Jahre                       | 3 Jahre                               | 1 Tag  | Nach Verwendung entsorgen                                     | -                               |

<sup>1</sup> Haltbarkeitsdatum - siehe jeweiligen Flaschenaufdruck. Nach Ablauf nicht mehr verwenden.

<sup>2</sup> Vorausgesetzt wird ein hygienischer Umgang mit dem Gebinde, ein festes Verschließen nach Öffnung und eine ordnungsgemäße Lagerung.

<sup>3</sup> Stets saubere bzw. keine bereits verwendeten Wischtexilien in die Lösung eintauchen.

# Haltbarkeit

| <b>Produkt</b>                 | <b>Max. Haltbarkeit <sup>1</sup></b> | <b>Haltbarkeit nach Anbruch <sup>2</sup></b> |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| B 15 Desinfektionstücher       | 4 Jahre                              | 3 Monate                                     |
| B 33 Desinfektionstücher       | 3 Jahre                              | 3 Monate                                     |
| B 40 Desinfektionstücher       | 3 Jahre                              | 1 Monat                                      |
| B 45 Desinfektionstücher       | 3 Jahre                              | 1 Monat                                      |
| B 60 Desinfektionstücher       | 3 Jahre                              | 3 Monate                                     |
| Chirosyn Händedesinfektion     | 5 Jahre                              | 6 Monate <sup>3</sup>                        |
| C 20 Hände + Haut Desinfektion | 4 Jahre                              | 12 Monate <sup>4</sup>                       |
| HD 410 Händedesinfektion       | 4 Jahre                              | 12 Monate <sup>3</sup>                       |
| C 25 Händedesinfektionsgel     | 3 Jahre                              | 12 Monate <sup>3</sup>                       |
| C 30 Hygienische Waschlotion   | 3 Jahre                              | 12 Monate                                    |
| C 45 Waschlotion               | 4 Jahre                              | 12 Monate                                    |
| C 50 Pflegelotion              | 2,5 Jahre                            | 12 Monate                                    |
| C 60 Hautschuttschaum          | 4 Jahre                              | 12 Monate                                    |

<sup>1</sup> Haltbarkeitsdatum - siehe jeweiligen Flaschenaufdruck. Nach Ablauf nicht mehr verwenden.

<sup>2</sup> Vorausgesetzt wird ein hygienischer Umgang mit dem Gebinde, ein festes Verschließen nach Öffnung und eine ordnungsgemäße Lagerung.

<sup>3</sup> Aus Sicherheitsgründen müssen die Händedesinfektionsmittel im Spender innerhalb von 3 Monaten nach der ersten Öffnung verbraucht werden. Ein hygienisch einwandfreier Zustand des Spenders wird bei Wiederbestückung vorausgesetzt.

<sup>4</sup> Aus Sicherheitsgründen muss das Händedesinfektionsmittel im Spender innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Öffnung verbraucht werden. Ein hygienisch einwandfreier Zustand des Spenders wird bei Wiederbestückung vorausgesetzt.

Die Kennzeichnung der Haltbarkeit nach Anbruch liegt in der Verantwortung des Anwenders.

# Haltbarkeit

| <b>Produkt</b>                             | <b>Max. Haltbarkeit <sup>1</sup></b> | <b>Haltbarkeit nach Anbruch <sup>2</sup></b> |
|--|--------------------------------------|--|
| orochemie® Hygienereiniger                 | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Schonreiniger                   | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Duftreiniger orange             | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Wischpflege                     | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Feinsteinzeugreiniger           | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Reiniger tensidfrei             | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Neutralreiniger                 | 3 Jahre                              | 3 Jahre                                      |
| orochemie® Glasreiniger eco                | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Universalreiniger eco           | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Kunstlederreinigung und -pflege | 3 Jahre                              | 3 Jahre                                      |
| orochemie® Sanitärreiniger eco             | 3 Jahre                              | 3 Jahre                                      |
| orochemie® Sanitärreiniger kf              | 3 Jahre                              | 3 Jahre                                      |
| orochemie® Sanitärreiniger viskos          | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Grundreiniger sauer             | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® WC-Reiniger                     | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Kalklöser                       | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Fettlöser                       | 4 Jahre                              | 4 Jahre                                      |
| orochemie® Ofen- und Grillreiniger         | 3 Jahre                              | 3 Jahre                                      |
| orochemie® Grundreiniger universal         | 3 Jahre                              | 3 Jahre                                      |
| orochemie® Bodenbeschichtung universal     | 3 Jahre                              | 3 Jahre                                      |

C 20 - 2-Propanol 70 % (V/V) - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim.

HD 410 - Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoffe 2-Propanol 47 g und 1-Propanol 26 g. Sonstige Bestandteile: Poly(oxyethylen)-6-glycerol(mono, di)alkanoat(C8 – C10), Farbstoff E 131, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: HD 410 ist nicht geeignet für die Desinfektion von Schleimhäuten und zur Anwendung auf der verletzten Haut. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf HD 410 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie z. B. Hauttrockenheit kommen. Hinweise: Bei Raumtemperatur lagern. Vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit schützen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim

Chirosyn Händedesinfektion - Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoffe 57,6 g Ethanol 96% (v/v) und 10 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propylenglykol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Parfum fresh. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Chirosyn Händedesinfektion darf nicht auf den Schleimhäuten und offenen Wunden angewendet werden. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf Chirosyn Händedesinfektion nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Insbesondere bei mehrfacher Anwendung kann es zu Irritationserscheinungen der Haut (z. B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) und bei hochfrequenter Anwendung auch zu weiter gehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Das Ausmaß und der Schweregrad dieser Erscheinungen hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegemaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Irritationserscheinungen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind. Hinweise: Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Haben Sie Fragen oder Wünsche?**  
**Ihr orochemie-Ansprechpartner im Außendienst informiert Sie gerne.**  
**Oder rufen Sie uns an unter Tel. 0 71 54 / 13 08-39 od. -46.**